

692

Rampas plegables

Subir un scooter o una silla de ruedas al coche se vuelve fácil gracias a las rampas. Estas rampas plegables aseguran que pueda colocar con seguridad pesados scooters y sillas de ruedas en su vehículo.



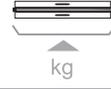
**Incluye bolsa de almacenaje.
Un juego contiene dos rampas.**



Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Nuevos Horizontes

Información técnica 692

						
1800	920	370	290	50	9 kg por pieza	150 kg por pieza

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles

01 Asideros para manejarlas con facilidad

02 Superficie anti-deslizante para la mejor tracción de la silla o scooter

Carga máxima **03**
150 kg por rampa

Usando las rampas

Las rampas son fáciles de usar:

1. Despliega la rampa.
2. Coloque la parte antideslizante sobre la superficie a abordar.
3. Asegúrese que las rampas están estables.
4. Suba el scooter o la silla de ruedas por las rampas.

04 Provistas de recubrimiento anti-deslizante para mejorar el agarre de las rampas



Vermeiren Ibérica SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel. +34 972 428 433

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.



VERMEIREN
Nuevos Horizontes



Sujeto a modificaciones técnicas.